



MEDintim
personal healthcare



DilatorSet

Medizinische Dehnungstifte aus Silikon zur Anwendung bei Dehnungsübungen.

Anwendungshinweise:

Mit der kleinsten Größe beginnend wird die Dehnungshilfe in die Vagina eingeführt und verbleibt dort mehrere Minuten. Wenn eine Größe beschwerdefrei eingeführt werden kann, empfehlen wir direkt im Anschluss zur nächsten Größe überzugehen, da die Scheidenmuskeln dann bereits entspannt sind. Die Anwendungen können im Liegen oder im Stehen, mit einem Bein auf einen Stuhl hochgestellt, erfolgen.

Wenn vom Arzt nicht anders empfohlen, sollten die Übungen täglich wiederholt werden. Es gibt keine zeitliche Begrenzung für die Anwendungsdauer der Dehnungshilfen.

Wenn das Einführen der größten Dehnungshilfe beschwerdefrei ist, kann penetrativer Geschlechtsverkehr versucht werden.

Anwendungsgebiete:

Bei vaginalen Beschwerden und Problemen beim penetrativen Geschlechtsverkehr aufgrund von

- Vaginismus,
- Dyspareunie,
- Infolge einer gynäkologischen Operation,
- nach einer Geburt

Inhalt:

- 6 Dehnungshilfen aus Silikon

Farbe	Durchmesser A/B	Länge C
Gelb	11/13 mm	65 mm
Rot	17/19 mm	75 mm
Blau	19/22 mm	90 mm
Violett	22/25 mm	110 mm
Altrosa	29/33 mm	130 mm
Graublau	35/41 mm	150 mm

- Gleitmittel SYLK (wasserlöslich)
- Tasche (Polyester)

Material:

Dehnungshilfen: Silikon

PZN 9013412

EAN 401327300079 6

Art. Nr.: MED DIL SET

CE Medizinprodukt



Kessel Marketing & Vertriebs GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. (06105) 20 37 20
Fax (06105) 45 59 01
E-Mail: service@medintim.de



www.medintim.de