



MEDintim
personal healthcare



Erektionsringe

Verstärkt und verlängert die Erektion.

Anwendung:

Zunächst die Hoden und dann den noch nicht erigierten Penis durch den Ring ziehen. Der Erektionsring sitzt zwischen Hoden und Körper an der Peniswurzel (Schaft). Bei richtig gewählter Größe sitzt der Ring fest, schmerzt jedoch nicht! Mit der Erregung füllt sich der Penis mit Blut, so dass der Erektionsring staut. Er verstärkt die Erektion und führt für beide Partner zu einem intensiveren Gefühl. Die Partnerin kann durch den Ring zusätzlich an der Klitoris stimuliert werden. Auch nach dem Orgasmus kann der Penis noch seine Stärke und Größe behalten und dadurch der Liebesakt verlängert werden.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass der Blutstau bei zu langer Anwendung auch Schmerzen verursachen kann. Falls Sie eine Latexallergie haben, sollten Sie die Ringe nicht verwenden.

- Inhalt: 3 Erektionsringe
- Naturkautschuklatex
- Farbe: blau
- Innendurchmesser: 3 Größen: 32 | 38 | 50 mm

Art. Nr.: MI ER
EAN 40 13273 000734
PZN 6681998



Kessel Marketing & Vertriebs GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. (06105) 20 37 20
Fax (06105) 45 59 01
E-Mail: service@medintim.de

www.medintim.de