

## Vorteile der FemCap®

- Sicher und ohne Nebenwirkungen
- Wirksam und bequem
- Praktisch und einfach in der Anwendung
- Natürliche Methode (hormonfrei)
- Sexuelle Empfindungen und Gewohnheiten beider Partner werden nicht beeinträchtigt
- Auch während der Stillzeit (Laktation) anwendbar
- Einlegen: bis zu 2 Stunden vorher, aber immer vor dem Verkehr. Sie muß vor der sexuellen Erregung eingesetzt werden.
- kann bis zu 48 Stunden liegen bleiben
- Ökonomisch, da wiederverwendbar (für mind. 1 Jahr)

Bei weiteren Fragen, wenden Sie sich an Ihre/n Ärztin/ Arzt oder schreiben uns an [service@medintim.de](mailto:service@medintim.de)

### Empfehlung:

Als Gel zur Anwendung mit der FemCap® empfehlen wir **Contragel grün®**, 60ml. Erhältlich in Apotheken. PZN 0761621

**Inhaltsstoffe:**  
Medizinisches Silikon

**Farbe:**  
transparent

**Hersteller:**  
FemCap Inc.,  
14058 Mira Montana  
Dr. Del Mar,  
CA 92014, USA



0050 Medizinprodukt



Import und Vertrieb:  
Kessel Marketing Et Vertriebs GmbH  
Kelsterbacher Strasse 28  
D-64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. +49 (0) 6105 20 37 20  
Fax +49 (0) 6105 45 59 01  
E-Mail: [service@medintim.de](mailto:service@medintim.de)

### Lieferbare Größen:

(Angabe des Innendurchmessers)

#### Klein (22 mm)

(für Frauen, die noch nicht entbunden haben)

1er Set  
PZN 6063131

#### Mittel (26 mm)

(für Frauen, die mit Kaiserschnitt entbunden haben oder einen Abbruch hatten.)

1er Set  
PZN 6063148

#### Groß (30 mm)

(für Frauen, die vaginal entbunden haben)

1er Set  
PZN 6063154




# FemCap®

Portiokappe aus Silikon zur Empfängnisverhütung

Die natürliche und hormonfreie Familienplanung für gesundheitsbewusste Frauen

[www.medintim.de](http://www.medintim.de)

  
**MEDintim**  
personal healthcare

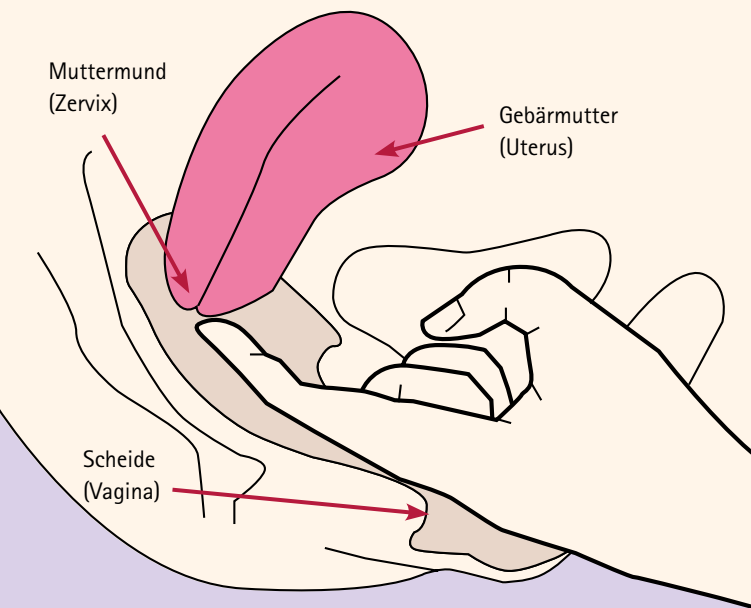


## Wichtig vor der ersten Anwendung:

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig
- Tasten Sie Ihren Muttermund (Zervix)
- Üben Sie selbst das Einlegen und Herausnehmen
- Schauen Sie sich den Film im Internet an.  
**femcap.medintim.de**

(Gerne senden wir Ihnen den Film als DVD zu, falls Sie ihn nicht über das Internet sehen können.)

Sie können auch Ihre/n Gynäkologin/en einmal prüfen lassen, ob Sie die FemCap® richtig eingesetzt haben.

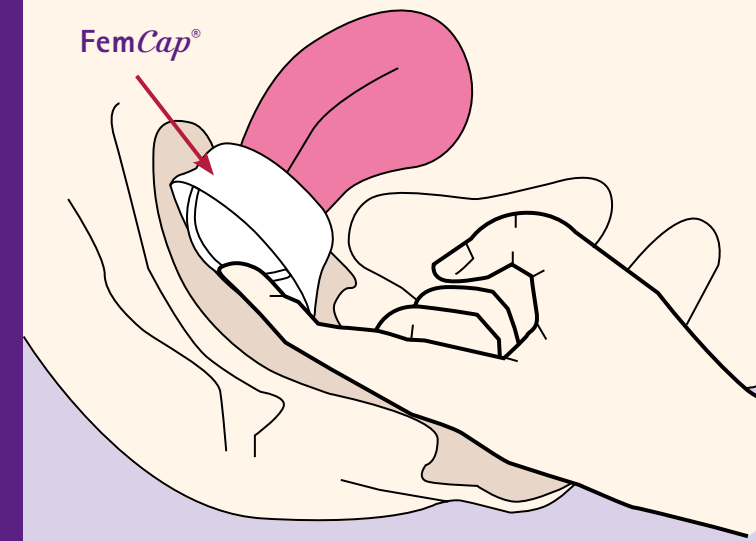

## vorher medizinisch abklären:

A) **Vaginale Untersuchung** zur Klärung der Größe des Muttermundes (Zervix) und Ausschluss von speziellen Anomalien an der Zervix (siehe Abbildung oben)

B) **Bestimmung der FemCap® Größe** entsprechend der persönlichen Vorgeschichte und Untersuchung.

Klein 22 mm: noch nie schwanger gewesen

Mittel 26 mm: bereits einmal schwanger gewesen, nach Fehlgeburt, nach Kaiserschnittentbindung, oder nach Schwangerschaftsabbruch

Groß 30 mm: vaginal entbunden



Klein  
22 mm

Mittel  
26 mm

Groß  
30 mm

C) **Richtige Lage der FemCap® prüfen.**



Üben Sie das Einlegen der FemCap®, damit die Anwendung einfacher wird.

- 1) Während der Anlernzeit können Sie als zusätzlichen Schutz (für wenige Tage) Ihre angebrochene Pillenpackung verwenden oder Sie verhüten zusätzlich mit einem Kondom.
- 2) Wichtig: Die FemCap® muss vor der sexuellen Erregung eingelegt werden.
- 3) Geben Sie das Gel immer in die Krempe der FemCap®.
- 4) Nach dem Geschlechtsverkehr muss die FemCap® mind. 6 Stunden liegen bleiben. Danach kann Sie herausgenommen, gereinigt und aufbewahrt werden.
- 5) Sollten Sie die FemCap® einmal vergessen oder nicht richtig eingesetzt haben, nehmen Sie in diesem Fall sofort die „Pille danach“ als „Notfallkontrazeption“.
- 6) Sehen Sie sich den Anwendungsfilm (DVD) in Ruhe an. Achten Sie genau auf die Schritte beim Einlegen und Herausnehmen.