



MEDintim
personal healthcare



Oralsafe

schützt bei oral-genitalen Kontakten.

Oral Safe ist ein Latexschutztuch, das den Schutz vor übertragbaren Infektionen bei oral-genitalem Kontakt verbessert.

Anwendung:

Lösen Sie das Latextuch vorsichtig aus der Umhüllung. Befeuchten Sie die Scheiden- oder Analregion mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis. Legen sie Oral-Safe über den Scheideneingang und die Klitoris, bzw. über den Analbereich. Halten Sie das Tuch während des oralen Verkehrs in seiner Lage fest. Das benutzte Tuch bitte in den Hausmüll und nicht in die Toilette werfen.

Inhaltsstoffe

Naturkautschuklatex

Inhalt

1 Latextuch zur einmaligen Verwendung, lieferbar mit neutralem Geschmack oder mit Vanille- bzw. Erdbeeraroma
Größe: 252 x 115 mm, Farbe: beige
VE: 10 Stk.

Lagerung

Kühl und trocken lagern.

Hersteller

Kessel Marketing & Vertriebs GmbH

Verkauf über den Fachhandel und in Apotheken.

Erdbeer EAN 4013273900164
PZN 0222367

Vanille EAN 4013273900171
PZN 0222396

Neutral Auf Anfrage



Medizinprodukt Klasse I



Kessel Marketing & Vertriebs GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. (06105) 20 37 20
Fax (06105) 45 59 01
E-Mail: service@medintim.de